

#### **INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA**

#### **RECUENTO DE LEUCOCITOS**

Código: LCD-H-IT-FW-5.4- GP1.2-213d

Página 1 de 2 Revisión: 01

**AREA HEMATOLOGIA & COAGULACION** 

Fecha revisión anterior: 17/10/2017 Fecha última revisión: 04/09/2020

### **RECUENTO DE LEUCOCITOS**

CODIGO FONASA: 0301065

# • Preparación del paciente.

Ayuno mínimo: 4 horas/ No ingerir alcohol 24 horas antes de realizar la prueba/ No realizar ejercicio intenso durante las 24 horas previas, reposar 30 minutos antes de la toma de muestra.

### Condición de la muestra.

**Tipo de Muestra: SANGRE TOTAL** - obtenido de Sangre Tubo Tapa Lila con anticoagulante EDTA



Cantidad Muestra mínima: 3 mL Sangre total con EDTA
Interferencias Relevantes: Hemolisis ++, Lipemia ++

#### Estabilidad de la muestra.

Tipo Muestra	Ambiente (20 - 25 ºC)	Refrigerada (2 - 8 ºC)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	24 horas	24 horas	No aplica
Sangre Total (VHS)	24 horas	24 horas	No aplica

## Condiciones del Transporte de Muestra.

Transportar a T° Ambiente o refrigerada a T° entre 4°C-8°C, por un tiempo no superior a 12 horas.

• Método: Método Per oxidasa

### Uso Previsto

Tipo de célula sanguínea que se produce en la médula ósea y que se encuentra en la sangre y los tejidos linfáticos. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Estos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades.

Un recuento de GB por debajo de lo normal puede deberse a:

- Deficiencia o insuficiencia de la médula ósea (por ejemplo, debido a infección, tumor o cicatrización anormal)
- Fármacos para el tratamiento del cáncer u otros medicamentos
- Ciertos trastornos auto inmunitarios como el lupus
- Enfermedad del hígado o del bazo
- Tratamiento de radiación para el cáncer
- Ciertas enfermedades virales, como mononucleosis.
- Infecciones bacterianas muy graves
- Estrés emocional o físico intenso (como por una lesión o cirugía)

Un recuento de GB por encima de lo normal se denomina leucocitosis. Puede deberse a:

- Ciertos fármacos o medicamentos
- Consumo de cigarrillo
- Después de una cirugía para extirpar el bazo

ELABORADO POR: TM. Evelyn Dominguez S.	REVISADO POR: TM. Marly Maitre R.	APROBADO POR: TM. Marcelo López V.	
English	Eau ?	<del></del>	
TM. Área Bioquímica	Jefe de Calidad	Director Técnico y Calidad	
04/09/2020	04/09/2020 04/09/2020		



#### **INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA**

#### **RECUENTO DE LEUCOCITOS**

Código: LCD-H-IT-FW-5.4- GP1.2-213d

Página 2 de 2 Revisión: 01

Fecha revisión anterior: 17/10/2017 Fecha última revisión: 04/09/2020

- Infecciones, casi siempre aquellas causadas por bacterias
- Enfermedad inflamatoria (como artritis reumatoide o alergia)
- Leucemia o enfermedad de Hodgkin
- Daño tisular (por ejemplo, quemaduras)

## • Días de procesamiento.

Lunes a viernes (Horario máximo de la recepción de muestras 16:00 horas).

## Horario de entrega de resultados.

Horario entrega resultados: Hasta 20:00 horas, del mismo día. Este horario de entrega podrá modificarse por requerimientos del Profesional a cargo de cada Área.

### Valor de Alerta Crítico.

Adultos y niños:

- >30.0 x 10^3/ mL
- < 3.0 x 10^3/ mL

Recién Nacidos (Hasta un mes):

- >25.0 x 10^3/ mL
- < 5.0 x 10^3/ MI

# • Instructivo para paciente. No aplica

# Valores de Referencia

Edad	Hombre	Mujer	
< 1 año	5.0 -17.5 x 10^3/ mL	5.0 -17.5 x 10^3/ mL	
1 – 12 años	5.0 -15.0 x 10^3/ mL	5.0 -15. <mark>0 x 10^3/ m</mark> L	
>12 años	4.0 -10.0 x 10^3/ mL	4.0 -10.0 x 10^3/ mL	
		DIAGNO	VIED LAB