

TIROXINA LIBRE-T4 LIBRE


CODIGO FONASA: 0303026

AREA BIOQUIMICA/HORMONAS I

- **Preparación del paciente.**

No requiere preparación.

- **Condición de la muestra.**

Tipo de Muestra: SUERO- obtenido de Sangre Tubo Tapa Amarillo o Tapa Roja. 

Cantidad Muestra mínima post centrifugación:

- 500 µL o 0.5 mL suero refrigerado.

- **Interferentes Relevantes:** Hemolisis: +, Lipemia: ++ e Ictericia: +++.

- **Estabilidad de la muestra.**

Tipo Muestra	Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	8 horas	Sin información	No aplica
Suero	8 horas	3 días	1 mes

- **Condiciones del Transporte de Muestra.**

Transportar Suero Refrigerado: 4-8 °C, por un tiempo no superior a 24 horas.

Transportar Suero o Sangre Total a T° Ambiente: 20-25 °C, por un tiempo no superior a 8 horas.

- **Método Analítico.** Inmunoensayo Quimioluminiscente.

- **Uso Previsto**

La T4 Libre medida en junto con la hormona estimulante de tiroides (TSH), es útil en la evaluación frente a la sospecha de trastornos de función tiroidea,

Los niveles de T4 libre están correlacionados con la secreción y el metabolismo de la T4. En el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, los niveles de FT4 libre reflejan los cambios en los niveles de T4 total. La medición de T4 libre es útil cuando se alteran los niveles de T4 total debido a cambios en las proteínas de unión de la T4, especialmente la Globulina fijadora de tiroxina (TBG).

- **Días de procesamiento.**

Lunes a viernes/Horario máximo de recepción de muestras 18:00 horas.

- **Horario de entrega de resultados.**

Horario entrega resultados: Hasta 20:00 horas, del mismo día de envío de la muestra.

El horario de entrega podrá modificarse por requerimientos del Profesional a cargo de cada Area.

- **Valor de Alerta Crítico.** No aplica.

- **Instructivo para Pacientes.** No aplica.

- **Valores de Referencia: (ng/dl)**

0 – 2 años: 0.94 – 1.44


2 - 20 años: 0.83 - 1.43

20 y más: 0.89 - 1.76

ELABORADO POR: TM. Marcelo López V.

REVISADO POR: TM. Marcelo López V.

APROBADO POR: TM. Marcelo López V.

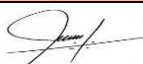



Director Técnico y Calidad

Director Técnico y Calidad

Director Técnico y Calidad

10/09/2020

10/09/2020

10/09/2020