

INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA

NITROGENO UREICO EN SANGRE

Código: LCD-QCA-IT-FW-5.4- GP1.2-875

Página 1 de 1 Revisión: 00

Fecha Creación: 12/07/2013 Fecha última revisión: 17/10/2017

NITROGENO UREICO EN SANGRE

CODIGO FONASA: 0302057 / CODIGO INTERNO: 03020571

Preparación del paciente.

Ayuno mínimo: 4 horas/ No ingerir alcohol 24 horas antes de realizar la prueba/ No realizar ejercicio intenso durante las 24 horas previas, reposar 30 minutos antes de la toma de muestra.

Condición de la muestra.

Tipo de Muestra: SUERO- obtenido de Sangre Tubo Tapa Amarillo o Tapa Roja. Cantidad Muestra mínima post centrifugación:



ÁREA BIOQUÍMICA/QUÍMICA CLÍNICA



- 500 μL o 0.5 mL suero refrigerado.

Interferencias Relevantes: Hemolisis ++

Estabilidad de la muestra.

Tipo Muestra	Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 ºC)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	24 horas	Sin información	No aplica
Suero	7 días	7 días	6 meses

Condiciones del Transporte de Muestra.

Transportar a T° Ambiente o refrigerada a T° entre 4°C-8°C, por un tiempo no superior a 12 horas.

Método: Ureasa-GLDH

Uso Previsto

La urea es un compuesto nitrogenado no proteico formado en el hígado a partir de amonio, un producto final del metabolismo de las proteínas. La urea difunde libremente en el fluido extra e intracelular siendo finalmente excretado por los riñones. Los niveles de nitrógeno ureico (BUN) reflejan el balance entre la producción y excreción de urea Balance Ureico Nitrogenado.

El BUN y la creatinina son comúnmente evaluados en conjunto.

Días de procesamiento.

Lunes a viernes (Horario máximo de la recepción de muestras 16:00 horas).

Horario de entrega de resultados.

Horario entrega resultados: Hasta 20:00 horas, del mismo día. Este horario de entrega podrá modificarse por requerimientos del Profesional a cargo de cada Área.

- Valor de Alerta Crítico. No aplica.
- Instructivo para paciente. No aplica
- Valores de Referencia

Hombre - Mujer: $5.0 - 23.0 \, \text{mg/dL}$

ELABORADO POR TM. Evelyn Dominguez S. TM. Diego Rojas R.	REVISADO POR TM. Marly Maitre R.	APROBADO POR TM. Marcelo López V.
Entre of	Eur ?	94
TM. Area Bioquímica – TM. Jefe Area Bioquímica	Jefe Calidad	Director Técnico y Calidad
17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017